

**Důležité!**

Bezpečnostní pokyny jsou určeny následujícím způsobem:



**VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O NEBEZPEČÍCH, KTERÁ MOHOU ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.**



**UPOZORNĚNÍ: Důležité informace, jak zabránit poškození přístroje FreeStyle Comfort.**

Poznámka: Informace, které vyžadují zvláštní pozornost.

**Indikace pro použití**

**VAROVÁNÍ: JE VELMI DŮLEŽITÉ ZVOLIT POUZE PŘEDEPSANOU ÚROVEŇ KYSLÍKU. NEMĚŇTE VÝBĚR PRŮTOKU, POKUD VÁM TO NEBYLO NAŘÍZENO OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM.**

**VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ NEBYLO TESTOVÁNO ANI SCHVÁLENO PRO POUŽITÍ U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ.**

**VAROVÁNÍ: V USA SMÍ BÝT PODLE FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ TATO ZAŘÍZENÍ PRODÁVÁNA A PRONAJÍMÁNA POUZE LÉKAŘI ČI JINÝMI LICENCOVANÝMI POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ PÉČE NEBO NA JEJICH PŘÍKAZ.**

**VAROVÁNÍ: TATO JEDNOTKA NENÍ URČENA K POUŽITÍ PRO PODPORU ŽIVOTA. U KAŽDÉHO UŽIVATELE, KTERÝ NENÍ SCHOPEN SDĚLIT NEPOHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ, MŮŽE BÝT VYŽADOVÁNO DALŠÍ SLEDOVÁNÍ. UŽIVATELÉ S POŠKOZENÝM SLUCEM A/NEBO ZRAKEM MOHOU POTŘEBOVAT POMOC PŘI SLEDOVÁNÍ ALARMŮ.**

**VAROVÁNÍ: NASTAVENÍ REŽIMU PULZNÍCH DÁVEK MUSÍ BÝT STANOVENO PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE INDIVIDUÁLNĚ PODLE JEHO VLASTNÍCH POTŘEB BĚHEM KLIDU, CVIČENÍ A CESTOVÁNÍ.**

**VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO K POUŽITÍ V DOMÁČÍM ZDRAVOTNICKÉM A PODOBNÉM AMBULANTNÍM PROSTŘEDÍ.**

**VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO K POUŽITÍ PACIENTEM, KTERÉMU JE PODÁVÁNA KYSLÍKOVÁ TERAPIE.**

**VAROVÁNÍ: NĚKTERÉ POKUSY PACIENTA O DÝCHÁNÍ NEMUSÍ SPUSTIT HOSPODÁRNOU FUNKCI.**

**VAROVÁNÍ: PŘÍSTROJ FREESTYLE COMFORT NENÍ URČEN K POUŽITÍ U PACIENTŮ, KTERÍ PRODĚLALI TRACHEOTOMII.**

**VAROVÁNÍ: TĚHOTNÉ NEBO KOJÍCÍ ŽENY BY NEMĚLY POUŽÍVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPORUČENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE, JELIKOŽ MŮŽE OBSAHOVAT FTALÁTY.**

**Kontraindikace pro použití**

**VAROVÁNÍ: ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT POUŽITÍ NEPŘEDEPSANÉHO KYSLÍKU NEBEZPEČNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ BY MĚLO BÝT POUŽÍVÁNO POUZE TEHDY, POKUD BYLO PŘEDEPSÁNO LÉKAŘEM.**

**VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ NEBO V BLÍZKOSTI PROSTŘEDÍ MAGNETICKÉ REZONANCE, JAKO JSOU PŘÍSTROJE MR.**

**VAROVÁNÍ: NENÍ URČEN K POUŽITÍ V PŘÍTOMNOSTI HOŘLAVÝCH ANESTETIK.**

**VAROVÁNÍ: STEJNĚ JAKO U JINÝCH ELEKTRICKY NAPÁJENÝCH ZAŘÍZENÍ MŮŽE DOJÍT K SITUACI, KDY PŘÍSTROJ NEBUDE MOCI FUNGOVAT KVŮLI PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ, PŘÍPADNĚ BUDE NUTNÉ PROVÉST SERVIS KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU KVALIFIKOVANÝM TECHNIKEM. KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR NENÍ VHODNÝ PRO ŽÁDNÉHO UŽIVATELE, JENŽ BY BYL KVŮLI TOMUTO DOČASNÉMU PŘERUŠENÍ VYSTAVEN NEPŘÍZNIVÝM DŮSLEDKŮM NA ZDRAVÍ.**

**VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ SCHVÁLENO PRO POUŽITÍ VE VŠECH PROSTŘEDÍCH. VYSTAVENÍ URČITÝM ELEKTROMAGNETICKÝM ZDROJŮM MŮŽE VÉST K RUŠENÍ NEBO NEZAMÝŠLENÉMU VÝKONU ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ RUŠENÍ JE TŘEBA ZAŘÍZENÍ OKAMŽITĚ VYPNOUT.**

## FreeStyle Comfort

### Bezpečnostní pokyny



**VAROVÁNÍ: NEJSOU POVOLENY ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ.**

**VAROVÁNÍ: TENTO PŘÍSTROJ DODÁVÁ VYSOCE KONCENTROVANÝ KYSLÍK, KTERÝ ZNAČNĚ PODPORUJE HOŘENÍ. VYVARUJTE SE KOUŘENÍ NEBO OTEVŘENÝCH PLAMENŮ VE STEJNÉ MÍSTNOSTI, KDE SE NACHÁZÍ (1) TENTO PŘÍSTROJ NEBO (2) JAKÉKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘENÁŠEJÍCÍ KYSLÍK. NEDODRŽENÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU POŽÁRU A ŠKODÁM NA MAJETKU A/NEBO ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ ČI SMRT.**

**VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE JEDNOTKU V OMEZENÉM NEBO STÍSNĚNÉM PROSTORU (TJ. V MALÉM POUZDRU NEBO RUČNÍ TAŠCE), V NĚMŽ MŮŽE BÝT OMEZENO VĚTRÁNÍ. MOHLO BY DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU A SNÍŽENÍ JEHO VÝKONU.**

**VAROVÁNÍ: KONCENTRÁTOR BY MĚL BÝT UMÍSTĚN TAK, ABY BYL CHRÁNĚN PŘED KOUŘEM, ZNEČIŠTĚNÍM ČI VÝPARY.**

**VAROVÁNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI S TÍMTO PŘÍSTROJEM, MĚL BY UŽIVATEL TUTO UDÁLOST NEPRODLENĚ NAHLÁSIT POSKYTOVATELI A/NEBO VÝROBCI. ZÁVAŽNÁ UDÁLOST JE DEFINOVÁNA JAKO ZRANĚNÍ, SMRT NEBO MOŽNOST ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ/SMRT V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO VÝSKYTU UDÁLOSTI. UŽIVATEL MŮŽE TAKÉ NAHLÁSIT UDÁLOST PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU V ZEMI, KDE K UDÁLOSTI DOŠLO.**



**VAROVÁNÍ: POUŽITÍ URČITÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VEDENÍ KYSLÍKU, KTERÁ NEJSOU URČENA PRO TENTO KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR, MŮŽE VÉST KE SNÍŽENÍ JEHO VÝKONU. DOPORUČENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU UVEDENA V TĚTO PŘÍRUČCE.**

**VAROVÁNÍ: POKUD BYL KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR UPUŠTĚN, POŠKOZEN NEBO VYSTAVEN PŮSOBENÍ VODY, OBRAŤTE SE NA DODAVATELE ZAŘÍZENÍ, ABY PŘÍSTROJ ZKontroloval NEBO PŘÍPADNĚ OPRAVIL. NEPOUŽÍVEJTE KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR, POKUD MÁ POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKU.**

**VAROVÁNÍ: PŘI PŘEPRAVĚ VE VOZIDLE KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR PEČLIVĚ PŘIPOUJEJTE NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠTĚTE, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ.**

**VAROVÁNÍ: PŘEDPISY MINISTERSTVA DOPRAVY USA (DOT) A ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN) VYŽADUJÍ PŘI VŠECH MEZINÁRODNÍCH LETECH VYJMUTÍ BATERIE ZE ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR ODBAVEN JAKO ZAVAZADLO. TAKÉ PŘI PŘEPRAVĚ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU MUSÍ BÝT BATERIE ZE ZAŘÍZENÍ VYJMUTA A ŘÁDNĚ ZABALENA.**

**VAROVÁNÍ: TENTO PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD SI NEPŘEČTETE A NEPOCHOPÍTE TUTO PŘÍRUČKU. POKUD NEROZUMÍTE VAROVÁNÍM A POKYNŮM, KONTAKTUJTE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ, DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE, JINAK MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO ŠKODÁM.**

**VAROVÁNÍ: POKUD CÍTÍTE BOLESTI NEBO SE NACHÁZÍTE V NALÉHAVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.**

**VAROVÁNÍ: PROVOZ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU MIMO URČENÝ ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT MŮŽE OMEZIT SCHOPNOST KONCENTRÁTORU SPLNIT SPECIFIKACE KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU. MEZNÍ HODNOTY TEPLoty NAJDETE V ČÁSTI TĚTO PŘÍRUČKY VĚNOVANÉ SPECIFIKACIM.**

**VAROVÁNÍ: NA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘENÁŠEJÍCÍ KYSLÍK A NA KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR NEPOUŽÍVEJTE OLEJE, MAZIVA, MATERIÁLY NA BÁZI ROPY ANI JINÉ HOŘLAVÉ VÝROBKY. POUŽÍVAT BY SE MĚLY POUZE ROZTOKY A BALZÁMY NA BÁZI VODY, KTERÉ JSOU KOMPATIBILNÍ S KYSLÍKEM. KYSLÍK URYCHLUJE SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK.**

**VAROVÁNÍ: NESPRÁVNÉ POUŽITÍ BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT, ŽE SE BATERIE ZAHŘEJE A VZNÍTÍ, COŽ MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM. DEJTE POZOR, ABYSTE BATERII NEPROPÍCHLI, NEUDEŘILI S NÍ, NESTOUPLI NA NI ČI JI NEUPUSTILI A ABYSTE JI NEVYSTAVOVALI JINÝM SILNÝM ÚDERŮM NEBO NÁRAZŮM. POUŽITÍ POŠKOZENÉ BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ OSOB.**

**VAROVÁNÍ: NEZKRATUJTE KOVOVÉ KONTAKTY BATERIE KOVOVÝMI PŘEDMĚTY, JAKO JSOU KLÍČE NEBO MINCE. TO MŮŽE ZPŮSOBIT JISKRY NEBO VÉST K TVORBĚ NADMĚRNÉHO TEPLA.**

**VAROVÁNÍ:** PŘI POUŽITÍ PŘENOSNÉHO KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ S NAPÁJENÍM STŘÍDAVÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJENÍ VŽDY POUZE DO ZÁSUVKY S OCHRANOU PROTI ZEMNÍMU SPOJENÍ (GFI).

**VAROVÁNÍ:** KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR BY SE NEMĚL POUŽÍVAT V BLÍZKOSTI JINÝCH ZAŘÍZENÍ ANI BÝT ULOŽEN NA NICH ČI POD NIMI. POKUD SE TAKOVÉMU POUŽITÍ NELZE VYHNOUT, ZAŘÍZENÍ BY MĚLO BÝT SLEDOVÁNO, ABY SE OVĚŘIL JEHO BĚŽNÝ PROVOZ.

**VAROVÁNÍ:** POUŽITÍ JINÝCH NEŽ K TOMU URČENÝCH KABELŮ A ADAPTÉRŮ, S VÝJIMKOU KABELŮ A ADAPTÉRŮ PRODÁVANÝCH VÝROBCEM ZDRAVOTNICKÉHO ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE JAKO NÁHRADNÍ DÍLY ZA VNITŘNÍ SOUČÁSTI, MŮŽE VÉST KE SNÍŽENÍ ODOLNOSTI KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU.

**VAROVÁNÍ:** POUŽÍVEJTE POUZE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA SPECIFIKAČNÍM ŠTÍTKU PŘIPEVNĚNÉM NA PŘÍSTROJI.

**VAROVÁNÍ:** V KOMBINACI S TÍMTO VÝROBKEM NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABELY ANI NEZAPOJUJTE PŘÍLIŠ MNOHO ZÁSTRČEK DO STEJNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE VÝKON ZAŘÍZENÍ. PŘÍLIŠ MNOHO ZÁSTRČEK V JEDNÉ ZÁSUVCE MŮŽE VÉST K PŘETÍŽENÍ ELEKTRICKÉHO PANELU, COŽ ZPŮSOBÍ AKTIVACI JISTIČE/POJISTKY NEBO DOKONCE VZNÍCENÍ, POKUD SE JISTIČ/POJISTKA NEUVEDE DO PROVOZU.



**UPOZORNĚNÍ:** V případě alarmu nebo zjištění, že kyslíkový koncentrátor nepracuje správně, nahlédněte do části Odstraňování problémů v této příručce. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, požádejte o radu dodavatele přístroje.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili zneplatnění záruky, dodržujte všechny pokyny výrobce.



**VAROVÁNÍ:** NEPOKOUŠEJTE SE O ŽÁDNOU ÚDRŽBU S VÝJIMKOU MOŽNÝCH ŘEŠENÍ UVEDENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.

**VAROVÁNÍ:** POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPORUČENÉ VÝROBCEM. POUŽITÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ A MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU A POUVEDE K ZNEPLATNĚNÍ ZÁRUKY.

**VAROVÁNÍ:** VÝROBCE DOPORUČUJE ALTERNATIVNÍ ZDROJ DOPLŇKOVÉHO KYSLÍKU PRO PŘÍPADY VÝPADKU PROUDU NEBO STAVU ALARMU ČI MECHANICKÉ ZÁVADY PŘÍSTROJE. O TYPU POŽADOVANÉHO ZÁLOŽNÍHO SYSTÉMU SE PORADTE SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO DODAVATELEM PŘÍSTROJE.

**VAROVÁNÍ:** ZABRAŇTE TOMU, ABY DOŠLO K ZABLOKOVÁNÍ PŘÍVODU VZDUCHU A VÝSTUPU VYFUKOVANÉHO VZDUCHU. NEPUSŤTE ANI NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY DO OTVORŮ PŘÍSTROJE. MOHLO BY DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU A SNÍŽENÍ JEHO VÝKONU.



**VAROVÁNÍ:** KOUŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ KYSLÍKU JE HLAVNÍ PŘÍČINOU ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH OHNĚM A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH ÚMRTÍ. MUSÍTE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

**VAROVÁNÍ:** VYVARUJTE SE KOUŘENÍ A POUŽITÍ SVÍČEK ČI OTEVŘENÉHO OHNĚ VE STEJNÉ MÍSTNOSTI, KDE SE NACHÁZÍ PŘÍSTROJ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘENÁŠEJÍCÍ KYSLÍK.

**VAROVÁNÍ:** KOUŘENÍ PŘI NOŠENÍ KYSLÍKOVÉ KANYLY MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY OBLIČEJE A MOŽNÁ I SMRT.

**VAROVÁNÍ:** POKUD KOUŘÍTE, MOHOU VÁM NÁSLEDUJÍCÍ 3 KROKY ZACHRÁNIT ŽIVOT: VYPNĚTE KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR, SEJMĚTE KANYLU A OPUSŤTE MÍSTNOST, V NÍŽ SE TENTO PŘÍSTROJ NACHÁZÍ.

## FreeStyle Comfort

<p><b>VAROVÁNÍ:</b> V DOMÁCNOSTI NEBO V MÍSTECH, KDE SE POUŽÍVÁ KYSLÍK, MUSÍ BÝT NA VIDITELNÉM MÍSTĚ UMÍSTĚNÝ NÁPISY „ZÁKAZ KOUŘENÍ – POUŽÍVÁ SE KYSLÍK“. UŽIVATELÉ A JEJICH PEČOVATELÉ MUSÍ BÝT INFORMOVÁNI O NEBEZPEČÍCH KOUŘENÍ V PŘÍTOMNOSTI LÉKAŘSKÉHO KYSLÍKU NEBO PŘI JEHO POUŽITÍ.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> NEPOUŽÍVEJTE KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR V PŘÍTOMNOSTI HOŘLAVÝCH PLYNŮ. TO MŮŽE VÉST K RYCHLÉMU HOŘENÍ, KTERÉ ZPŮSOBÍ ŠKODY NA MAJETKU, TĚLESNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> ODSTRANĚNÍ KANYLY A JEJÍ ULOŽENÍ NA OBLEČENÍ, POVLEČENÍ, POHOVKU NEBO JINÝ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL ZPŮSOBÍ PO KONTAKTU S CIGARETOU, ZDROJEM TEPLA NEBO PLAMENEM OKAMŽITÝ OHEŇ.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> NOSNÍ KANYLU NENECHÁVEJTE NA OBLEČENÍ, POKRÝVCE POSTELE ČI POLSTROVÁNÍ KŘESLA ANI POD NIMI. POKUD JE JEDNOTKA ZAPNUTÁ, ALE NEPOUŽÍVÁ SE, KYSLÍK UČINÍ Z TĚCHTO MATERIÁLŮ HOŘLAVÉ LÁTKY. ZAJISTĚTE, ABY BYL KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR VYPNUTÝ, KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODÁVÁNÍ KYSLÍKU JE NAVRŽENO TAK, ABY OMEZOVALO ŠÍŘENÍ POŽÁRU V ZÁJMU BEZPEČNOSTI PACIENTA. POUŽITÍ NESCHVÁLENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ MŮŽE ZVÝŠIT RIZIKO ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ V SOUVISLOSTI S POŽÁREM.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> PŘED VYJMUTÍM AKUMULÁTORU MUSÍ BÝT KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD VNĚJŠÍHO NAPÁJENÍ.</p>	<p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Neumíst'ujte kyslíkový koncentrátor tak, aby byl obtížný přístup k napájecímu kabelu.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Přívodní hadice kyslíku a napájecí kabely vždy umístěte takovým způsobem, aby se zabránilo riziku zakopnutí nebo možnému náhodnému uškrcení.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Při používání kyslíkového koncentrátoru v automobilu, na lodi nebo u jiných zdrojů stejnosměrného proudu v kombinaci s napájecím zdrojem pro stejnosměrný proud před připojením kyslíkového koncentrátoru zajistěte, aby bylo vozidlo nastartované a v chodu. Nedodržení těchto pokynů může vést k tomu, že napájecí zdroj nebude do kyslíkového koncentrátoru dodávat energii.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Když je automobil, ve kterém používáte kyslíkový koncentrátor, vypnutý, přístroj odpojte a vyndejte jej z automobilu. Neskladujte kyslíkový koncentrátor ve velmi horkém nebo chladném automobilu ani v žádném jiném podobném prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami.</p> <p>Poznámka: Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na zdravotnické elektrické přístroje.</p>
<p> <b>VAROVÁNÍ:</b> MALÉ DÍLY MOHOU PŘEDSTAVOVAT POTENCIÁLNÍ RIZIKO UDUŠENÍ.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> VYVARUJTE SE KONTAKTU S OTVORY VYFUKOVANÉHO VZDUCHU NA DOBU DELŠÍ NEŽ 10 SEKUND, PROTOŽE MOHOU BÝT TEPLÉ.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> VÍTR ČI SILNÝ PRŮVAN MŮŽE NEPŘÍZLIVĚ OVLIVNIT SPRÁVNÝ PRŮBĚH LÉČBY KYSLÍKEM.</p> <p><b>VAROVÁNÍ:</b> TENTO VÝROBEK VÁS MŮŽE VYSTAVIT CHEMICKÝM LÁTKÁM, VČETNĚ NIKLU, KTERÝ JE VE STÁTĚ KALIFORNIE POVAŽOVÁN ZA KARCINOGEN. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA <a href="http://WWW.P65WARNINGS.CA.GOV">WWW.P65WARNINGS.CA.GOV</a>.</p>	<p> <b>UPOZORNĚNÍ:</b> NENECHÁVEJTE kyslíkový koncentrátor ani napájecí zdroj připojený k vozidlu, pokud je zapalování vypnuto. Pokud tak učiníte, může dojít k vybití baterie vozidla.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Používání nebo skladování kyslíkového koncentrátoru mimo rozsah jeho běžných provozních teplot a rozsah okolního tlaku (nadmořské výšky) může ovlivnit výkon a snížit provozní dobu baterie nebo zvýšit dobu nabíjení baterie. Mezní hodnoty skladovací a provozní teploty najdete v části této příručky věnované specifikacím.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> U kyslíkových koncentrátorů vybavených bateriemi: Skladujte je na chladném a suchém místě, abyste pomohli zajistit dlouhou životnost baterie. Dlouhodobé skladování kyslíkového koncentrátoru při vysokých teplotách nebo s plně nabitou či zcela vybitou baterií může snížit celkovou životnost baterie. Nepokoušejte se otevřít baterii – uvnitř baterie nejsou žádné díly určené k servisu. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> POUŽÍVEJTE POUZE baterie dodané výrobcem. Pro řádnou likvidaci baterie požádejte o pokyny dodavatele zařízení nebo místní státní úřad.</p>

## FreeStyle Comfort

Poznámka: Pro zmírnění škod způsobených koncentrátorem nebo výpadkem napájení by měl poskytovatel zařízení posoudit potřebu záložního kyslíku během instalace a pravidelně, když se tyto atributy změní:

- Stav pacienta
- Prostředí, ve kterém pacient žije
- Možnost doplnit pacientovi zásoby doplňkového kyslíku.

Poznámka: Přesvědčte se, že je kanyla zcela zasunutá a zajištěná. Díky tomu dokáže kyslíkový koncentrátor správně rozeznat nadechnutí a dodávat kyslík. Během nádechu byste měli slyšet nebo cítit, jak kyslík proudí do hrotů nosní kanyly.

Poznámka: Lithiové baterie mohou permanentně ztrácet kapacitu, když jsou v plně nabitém nebo zcela vybitém stavu vystaveny extrémně vysokým teplotám. Za účelem dlouhodobého skladování se doporučuje, aby baterie byly nabité na 25–50 % a uchovávaly se v teplotním rozsahu –20 až +20 °C (–4 až +68 °F).

Poznámka: Kyslíkový koncentrátor nepoužívejte bez nainstalovaného filtru na přívodu vzduchu. Je-li k dispozici druhý filtr, vložte do přístroje náhradní filtr před vyčištěním zaneseného filtru. Zanesený filtr vyčistěte v teplé mýdlové vodě a před použitím jej řádně vysušte.

Poznámka: Výrobce nedoporučuje sterilizaci tohoto zařízení.

Poznámka: Při použití kyslíkového koncentrátoru nikdy nehrozí unikání kyslíku do místnosti.

Poznámka: Pokud byl kyslíkový koncentrátor delší dobu uskladněn mimo běžné provozní podmínky znázorněné v tabulce specifikací, nechte jej před zapnutím zahřát/vychladnout na běžnou provozní teplotu.

Poznámka: Poskytovatel zařízení by měl posoudit potřebu záložního kyslíku pro případ výpadku koncentrátoru nebo napájení při instalaci a pravidelně při změně těchto atributů:

- Stav pacienta
- Prostředí, ve kterém pacient žije
- Možnost doplnit pacientovi zásoby doplňkového kyslíku.



**VAROVÁNÍ: KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR BY SE NEMĚL POUŽÍVAT ANI PŘIPOJOVAT K EXTERNÍMU ZDROJI STŘÍDAVÉHO NEBO STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU, POKUD NENÍ NAINSTALOVANÁ BATERIE. JESTLIŽE JE BATERIE VYJMUTÁ, NEPOKOUŠEJTE SE JEDNOTKU ZAPNOUT ANI PŘIPOJIT K EXTERNÍMU ZDROJI NAPÁJENÍ.**

**BATERII VYJMĚTE POUZE VE CHVÍLI, KDY JE JEDNOTKA VYPNUTÁ A ODPOJENÁ OD PŘÍVODU NAPÁJENÍ. NEPOKOUŠEJTE SE BATERII VYJMOUT, KDYŽ JE JEDNOTKA STÁLE ZAPNUTÁ NEBO PŘIPOJENÁ K PŘÍVODU NAPÁJENÍ.**