

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

V uživatelské příručce jsou použity následující výstražné symboly:



Tento symbol upozorňuje na všechna nebezpečí. Existuje riziko pro bezpečnost uživatele, potenciální poškození výrobku a možné materiální nebo environmentální škody.



Všichni, kdo pracují se zde popsaným komorovým ohřívačem, musí být obeznámeni s obsahem této uživatelské příručky a dodržovat bezpečnostní pokyny, jež jsou pro ně relevantní.



Tato příručka by měla být pro případ potřeby ponechána pro budoucí použití.

Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny!

Před zahájením provozu musí každý uživatel zařízení absolvovat školení o bezpečné manipulaci podle této příručky, která je vždy součástí zařízení.

Každý uživatel by měl věnovat zvláštní pozornost potenciálním rizikům vyplývajícím z nesprávného používání komorového ohřívače **Warmqube**.

Komorový ohřívač Warmqube by měl obsluhovat pouze proškolený zdravotnický personál.

- Vysvětlíte každému uživateli, jak zařízení bezpečně obsluhovat.
- Pokud existuje podezření na poškození nebo poruchu, přestaňte komorový ohřívač Warmqube používat:
 - Zařízení okamžitě odpojte od zásuvky.
 - Zařízení zřetelně označte jako „POŠKOZENÉ“.
- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- Tato příručka by měla být uložena na dostupném místě pro uživatele.
- Zařízení musí být napájeno z uzemněné elektrické zásuvky.
- Zajistěte zablokování koleček vždy, když je zařízení ponecháno bez dozoru, a po každém přesunu.
- Nesedějte si na otevřenou zásuvku ani se o ni neopírejte, protože by mohlo dojít k překlopení zařízení.
- Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům uvedeným v každé části této příručky!
- Komorový ohřívač **Warmqube** není určen pro mechanické mytí.
- Před zahájením jakékoli opravy nebo údržby musí být zařízení vypnuto a odpojeno od napájení.
- Používejte pouze originální vybavení.

Oprava zařízení během záruční doby i po ní by měla být provedena pouze autorizovaným servisem.



Společnost Prolab Sp. z o.o. si vyhrazuje právo upravovat své vlastní výrobky a uživatelské příručky bez uvedení důvodu, práva na náhradu škody nebo požadavku na předchozí oznámení. Všechny obrázky jsou pouze pro demonstrační účely a mohou se lišit od konečného výrobku.